

## NOTICIAS IMPORTANTES sobre la precisión de su Prueba Parvo SNAP® relacionadas con las vacunas para parvovirus

Estimado Doctor,

Una de las preguntas más frecuentes que recibimos sobre las pruebas para parvo es, **¿“Interfieren las vacunas para Parvo con los resultados de la Prueba Parvo SNAP®?”**


Esta es una preocupación común cuando se testean cachorros con signos clínicos consistentes con parvovirus.

Hay datos nuevos que responden a esta preocupación, proveyéndole a usted la confianza cuando una Prueba de Parvo SNAP positiva es indicadora de una infección por parvovirus.

**En un estudio reciente de 64 perros vacunados con 6 diferentes vacunas vivas de CPV-2, no se detectó una reacción cruzada con la Prueba SNAP para el Antígeno de Parvovirus.\***

	Vacuna	Número de perros vacunados	Número de perros con reacción cruzada a SNAP Parvo
Ft. Dodge Animal Health	Duramune® Max 5	15	0
Intervet	Progard® 5	5	0
Pfizer Animal Health	Vanguard® Plus 5L	14	0
Merial	Recombitek® C4	5	0
Schering-Plough Animal Health	Galaxy® DA2PPv	5	0
NEOTECH LLC	NeoPar®	20	0
	<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>0</b>

Use la prueba Parvo SNAP para confirmar su diagnóstico tanto en perros vacunados como en perros no vacunados, dándole así el apoyo rápido y la acción decisiva que necesita su práctica.

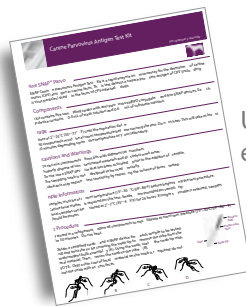

Usted verá esta información en su anexo pronto.

Por favor informe a su personal sobre este desarrollo importante. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a nuestro Grupo de Ayuda al Cliente en cualquier momento al 1-800-248-2483. Gracias por hacer negocios con nosotros!

Sinceramente,,

Leif Lorentzen, DVM  
Mercadeo de Pruebas Rápidas